

R-50

HAEN 3 PREMIWM

MWGWGD WYNEB Y GELLIR EI AIL-DDEFNYDDIO

Cadwch Cymru yn ddiogel



WEDI'I WNEUD YNG
NGHYMRU

Gwrthsefyll hyd at 50 o golchion

MAINT OEDOLYN

BAND TRWYN HYBLYG

DOLENNI CLUST ADDASADWY AR GYFER FFFITIO'N WELL



3 HAEN

- HAEN ALLANOL WEDI'I ARGRAFFU YN DDIGIDOL
- HAEN GANOL HIDLO UCHEL
- HAEN FEWNOL FFABRIG ANADLADWY

FFABRIG HIDLO PERFFORMIAD
UCHELL EITHRIADOL



Sut i wisgo'ch masg wyneb:

1. Golchwch dwylo
2. Codwch mwgwd gyda chlustffonau
3. Rhowch mwgwd dros y trwyn a'r geg
4. Rhowch y ddolenni o gwmpas y clustiau ac addaswch i ffitio'n gyfforddus
5. Mowldiwch glip y trwyn i gyfuchlin eich wyneb
6. Paid â chyffwrdd dy wneb wrth wisgo eich mwgwd
7. Tynnwch y mwgwd gan ddefyddio dolenni clust
8. Peidiwch â defnyddio eto tan ar ôl golchi

Gweithgynhyrchwyd: RotoMedical, British
Rototherm Co. Ltd, Kenfig Industrial Estate,
Margam, Port Talbot, SA13 2PW

www.rotomedical.com



Nid yw'r ddyfais hwn yn ddyfais feddygol yn yr ystyr Rheoliad EU/2017/745 (masgiau llawfeddygol) ac nid yw'n offer amddiffynnol personol yn yr ystyr o Reoliad EU/2016/425 (math mwgwd hidlo FFP2)

Cadwch Cymru yn ddiogel



Wedi'i wneud yng Nghymru

MAINT OEDOLYN

R-50

HAEN 3 PREMIWM
MWGWD WYNEB Y GELLIR EI
AIL-DDEFNYDDIO

Golchadwy hyd at
50 o ddefnyddiau

Cyfarwyddiadau golchi



Peiriant golchu



Peiriant y gellir ei olchi (hyd at 60 °C/ 140 °F)



Dillad isel yn sych



Peidiwch â smwddio



Peidiwch â sychu'n lân



Gwrthsefyll hyd at 50

Sylwch:

1. Argymhellir bod plant rhwng 3 a 12 mlwydd oed yn cael eu goruchwyllo wrth wisgo'r mwgwd R-50.
2. Ddim yn addas ar gyfer plant o dan 3 mlwydd oed.
3. Os ydych chi'n sâl, mae'r mwgwd hwn ddim yn addas. Gofynnwch am gyngor gan eich meddyg.

 ROTO
MEDICAL

www.rotomedical.com